



Аппарат криолиполиза Cryolipolysis Yeti

Аппарат эстетической медицины и косметологии для безоперационного устранения локальных жировых отложений сильным охлаждением



Аппарат криолиполиза Cryolipolysis Yeti – современный аппарат эстетической медицины и косметологии, предназначенный для безоперационного устранения локальных жировых отложений сильным охлаждением.

Криолиполиз Yeti – естественно, легко и безопасно

Криолиполиз – современный неинвазивный метод устранения нежелательных локальных жировых отложений. Методика считается одной из самых эффективных в этой сфере аппаратной косметологии, а липосакция на сертифицированном аппарате Cryolipolysis Yeti с технологиями ITS Group – это новый уровень безопасности и действенности.

Аппарат комплектуется 4 манипулами. Использование инноваций в конструкции и электронике манипул позволит повысить производительность процедуры. Идеальный результат получается благодаря быстрому охлаждению и поддержке температуры на заданном уровне. Вес манипул уменьшен, что упрощает работу косметолога и техническое обслуживание аппарата.

По желанию пользователя аппарат может дополнительно комплектоваться аппликаторами с глубиной проникновения 1,5 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10 мм, 16 мм.

Каждый узел аппарата Cryolipolysis Yeti проработан с особой тщательностью для достижения максимального эффекта в кратчайшее время, при этом дизайн аппарата отвечает самым высоким стандартам стиля Made in Italy – элегантно, оригинально и совершенно.

По желанию пользователя аппарат может дополнительно комплектоваться аппликаторами с глубиной проникновения 1,5 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 10 мм, 16 мм.

Криолиполиз Yeti. Как он работает?

В аппарате Cryolipolysis Yeti используется технология контролируемого действия низких температур, которая была разработана исследовательскими группами Гарвардского университета и Массачусетской больницы общего профиля. Методика признана реальной альтернативой хирургической липосакции со



всеми плюсами и преимуществами неинвазивного лечения.

Снижение температуры жировой ткани в диапазоне от - 5 до - 10 градусов по Цельсию запускает процесс апоптоза в жировых клетках. Процедура криолиполиза проводится следующим образом: на проблемный участок размещается вакуумный датчик, который «затягивает» жировую ткань, затем проводится равномерное охлаждение ткани встроенными элементами Пельтье.

Низкая температура вызывает нарушение обменных процессов и разрушение жировых клеток при этом другие ткани остаются невредимы. Остатки жировых клеток фагоцитируются и выводятся через лимфатические и кровеносные пути.

Аппарат криолиполиза Yeti. Быстрое охлаждение и полный контроль над температурой.

Современное программное обеспечение позволяет эффективно управлять и контролировать модуль охлаждения, который состоит из 6 элементов Пельтье - это на 4 раза больше, чем у аппаратов криолиполиза схожего класса.


Температурный контроль осуществляется системой чувствительных детекторов. Они непрерывно измеряют и регистрируют температуру, обеспечивая быстрое и равномерное снижение температуры на всех участках обрабатываемой зоны.



Аспирационно-вакуумный модуль постоянно варьирует силу всасывания, предотвращая кристаллизацию межтканевой жидкости и исключая какие-либо повреждения.

Аппликаторы аппарата криолиполиза Cryolipolysis Yeti.

Корпус аппликатора сделан из антикоррозиона (сплав алюминия, магний, марганец и кремний). Металл устойчив к износу, коррозии и перепаду температур, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

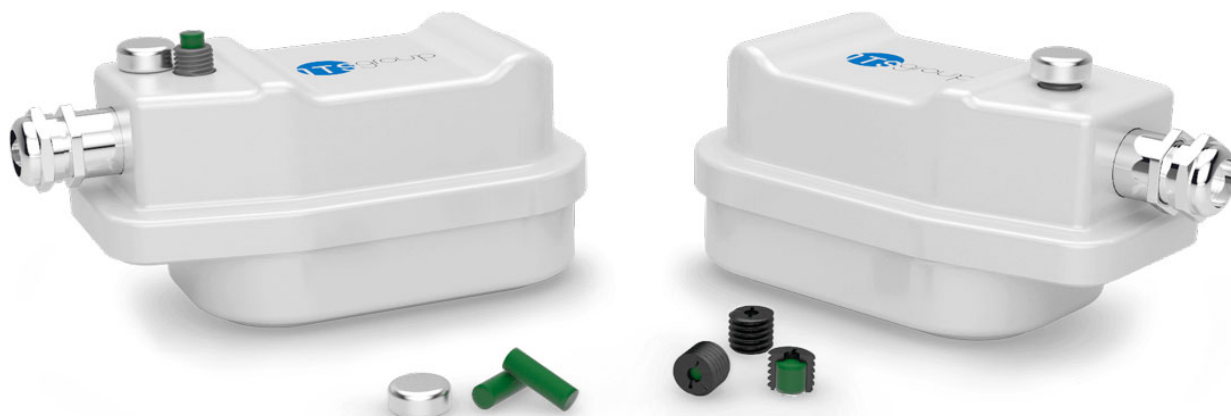

Революционная конструкция аппликатора максимально усиливает охлаждающий эффект. Система двойного фильтрования устраняет риск засорения, увеличивает срок эксплуатации и снижает затраты на техническое обслуживание.

Аппарат криолиполиза Cryolipolysis Yeti. Почему выбирают нас?

- Комфорт и удобство. Легкие и эргономичные аппликаторы.
- Безопасность. Точное измерение температуры ткани при помощи системы нелинейного контроля.
- Инновационные аппликаторы: 4 аппликатора для эффективной обработки всех областей тела.
- Экономичность. Снижение эксплуатационных расходов благодаря новой переменной системе двойного фильтра.
- Быстрый результат. Несколько сеансов для получения эффекта: достаточно 1 сеанса в месяц, всего 3-5 сеансов.
- Быстрая окупаемость. Надежные инвестиции с гарантируемым долгосрочным доходом.
- И главное – счастливые пациенты!

Аппарат вакуумного криолиполиза Cryolipolysis Yeti – эталон современных безоперационных технологий по контурированию тела