## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Аппарат контактной диатермии DCDP-1

Аппарат контактной диатермии мощностью 150 Вт и комплектом резистивных/емкостных головок аппликатора



Аппарат контактной диатермии DCDP-1 мощностью 150 Вт и комплектом резистивных/емкостных головок аппликатора.

Терапевтический эффект при контактной диатермии (ТЭКАР-терапия) достигается влиянием на биологические ткани высокочастотной электромагнитной энергией, что приводит к выборочному направленному прогреванию. Результат – быстрое снятие болевого синдрома, расслабление мышц, уменьшение отеков, стимуляция регенеративных и метаболических процессов.

Контактная диатермия может использоваться в качестве монометода и в комбинации с другими физиотерапевтическими методиками, нацеленными на снятие болевого синдрома, снятие мышечных спазмов, возврат к полному спектру движения.

Резистивные и емкостные электроды влияют на разные типы биологических тканей. Энергия резистивного электрода влияет на сухожилия и поверхности костей, а емкостный электрод – на мышцы. Диапазон частот DCDP-1 от 0.5 до 1 МГц позволяет сигналу максимально эффективно действовать как на глубокие участки тела, так и поверхностные анатомические структуры.

Мощность излучения в 150 Вт позволяет работать с острыми, подострыми и хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. При острых состояниях мощность воздействия должна быть меньше, чем при хронических заболеваниях.

Активный аппликатор для ТК-терапии имеет удобную эргономичную форму, максимально приспособленную для использования контактной методики. Очистка и дезинфекция аппликатора производится согласно стандартному протоколу, растворам без хлора и содержанию спирта не более 20%. Комплект головок аппликатора с разным диаметром позволяет эффективно работать с мелкими и большими анатомическими участками.

- Режим работы: резистивный/емкостный
- **Рабочие частоты:** 0.5/1.0 МГц
- Максимальная выходная мощность: 150 Вт.
- Шаги нарастания мощности: от 1 до 10

[1] URL: http://medexim.ua

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: a/c 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

• Время работы/паузы: от 3 до 10 секунд/от 0 до 10 секунд

• Продолжительность терапии: от 1 до 60 мин.

• Класс электробезопасности: I BF • Тип нейтрального электрода: F • Размеры (ВхШхГ): 170 x 315 x 390 мм

• **Bec:** 5 кг

[2] URL: http://medexim.ua 17 грудня 2025 року