





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073. Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

## Стоматологическая установка GLADENT GT-S200

современная стоматологическая установка



Стоматологическая установка GLADENT GT-S200 - комплекс высокотехнического оборудования для оснащения стоматологических кабинетов и клиник.

Качество, доступная цена, превосходные технические и функциональные характеристики является безусловным достоинством стоматологической установки ZA-208A. Питание установки осуществляться сжатым воздухом, который очищенный от капельной влаги, механических и химических включений.

Подключение безмасляного компрессора проводится по простой и доступной схеме. Аспирационная система установки рассчитана на использование 3-х функции (вода, воздух, спрей). Подачу и регулировку потоку воздуха и воды возможно проводить, как с рукоятки, так и с пульта управления. Равномерный и сильный поток воздуха обеспечивает полное удаление пыли и аэрозолей, которые образуется работе с кариозной полостью.

Стоматологическая установка комплектуется микродвигателем с реверсом и регулировкой скорости вращения инструмента. Управление наполнения стакана водой, смыв плевательницы и подогрев воды осуществляется с врачебного столика и пульта управления ассистента.

Кресло пациента представляет собой единый комплекс с моноблоком. Оно легко переводится в горизонтальную позицию и имеет память на 9 положений. Кресло имеет трех секционную конструкцию. Контуры сиденья и спинки обеспечивают максимально возможную опору для пациента, обеспечивая анатомическое соответствие телу и максимальную релаксацию при манипуляции.

Относительно тонкая спинка кресла позволяет врачу придвинуться к пациенту как можно ближе. Упор для спины имеет максимальную ширину в области лопаток, сужаясь книзу. Такая конструкция секции обеспечивает надежную поддержку позвоночника.

Подлокотники легко перемещаются из горизонтального в вертикальное положение. Подголовник имеет широкую амплитуду движений с возможностью фиксации. Изменение положения стоматологического кресла проводится с рабочего места врача и ассистента с помощью пульта управления и ножной педали.

Покровный материал кресла устойчив к физическим и химическим факторам и выдерживает

## ТОВ «МЕД ЕКСІМ»





Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032. Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.

Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23 E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua

Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

многократные обработки антисептиками и дезинфицирующими средствами. Цвет покрытия возможно подобрать индивидуально.

[2] URL: http://medexim.ua 28 жовтня 2025 року